

Инструкция по применению

Ленты диаграммные рулонные и складывающиеся для медицинских регистрирующих приборов

ТУ 17.12.14-004-22261422-2017

РУ № ФСР 2009/06045 от «30» ноября 2018 г.

Ленты диаграммные рулонные и складывающиеся для медицинских регистрирующих приборов предназначены для записей показаний всех видов медицинских регистрирующих приборов.

Ленты выпускаются различных вариантов исполнения и типоразмеров.

Вариант исполнения и типоразмер ленты указаны на этикетке.

Плотность лент от 48 до 90 г/м². Белизна бумаги-основы: от 81 до 98%.

Применяемая бумага-основа: бумага-основа АО «ГОЗНАК» (Россия), термобумага-основа «ЛТК» (Финляндия), полипропиленовая термопленка-основа «ЛТК» (Финляндия), «International Imaging Materials» Inc. (США), термобумаги-основы «HANSOL PAPER CO. LTD» (Южная Корея).

Выбор необходимого варианта исполнения ленты зависит от характеристик прибора, с которым планируется использовать бумагу.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

1. Извлечь ленту нужного варианта исполнения и размера из упаковки;
2. Установить ленту в протяжное устройство прибора согласно эксплуатационной документации прибора.
3. Согласно эксплуатационной документации прибора провести снятие показаний.
4. После остановки диагностического прибора произвести отрыв ленты с нанесёнными на неё показаниями.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Для предотвращения снижения качества термоленты на лентах при хранении необходимо следовать нижеуказанным мерам:

-Температура воздуха не должна превышать 25° С;

-Относительная влажность воздуха не выше 40-60 %;

-Не допускать прямого попадания солнечного (ультрафиолетового) света;

-Избегать хранения ленты со следующими материалами: бумагой, содержащей органические растворители, включая (но, не ограничиваясь) трибутилфосфат, и / или дибутилфосфат; углеродосодержащими формами; материалами содержащими ПВХ такие как (но, не ограничиваясь) файл-пашки, конверты, разделители; чистящими жидкостями и растворителями, такими как спирты, кетоны, эфиры и т.д.; материалами, содержащими адгезивные вещества;

архивными накопителями, изготовленными с применением водосодержащих материалов.

При утилизации используются обычные методы утилизации бумаги;

Степень воспламеняемости лент аналогична бумаге без покрытия;

Использование, хранение и утилизация лент не вызывает экологического загрязнения.

Транспортирование и хранение лент по ГОСТ 20259 и ГОСТ 12997.

Ленты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ГАРАНТИИ

Производитель гарантирует соответствие лент требованиям ТУ 17.12.14-004-22261422-2017 при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Срок сохранности отпечатанных данных:

срок сохранности изображения на лентах при хранении согласно вышеуказанным требованиям 7(семь) лет (для более длительного срока хранения рекомендуется создавать ксерокопию).

Производитель: Закрытое акционерное общество «Фабрика диаграммных бумаг», 308017, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, 161-Г

Претензии и рекламации направлять: Закрытое акционерное общество «Фабрика диаграммных бумаг», 308017, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, 161-Г. Телефон: +7 4722 21-49-94, 21-49-95.
e-mail: import@bdfb.ru.